

SERINGUE DOSEUSE - modèle 5 ml - C€

La seringue doseuse permet d'administrer facilement et proprement un médicament à votre enfant.

Notre seringue doseuse est graduée de 0.5 en 0.5, jusqu'à 5 ml (millilitre).

UTILISATION :

- Relire attentivement la notice du médicament à administrer
- Prélever la dose avec la seringue doseuse directement dans le flacon.
- Donner la dose à votre enfant (directement dans la bouche, ou à l'aide de notre tétine médicamenteuse).

ENTRETIEN :

- Rincer la seringue doseuse après chaque utilisation sous le robinet, en l'actionnant plusieurs fois (réaliser des dosages à l'eau).
- Mode de stérilisation préconisé : à froid uniquement (chimique, avec comprimé spécifique) ; ne pas laisser plus longtemps que la durée recommandée).

- -----
- Produit « (conformité à la directive 93/42/CEE)

AVERTISSEMENT ! Pour la sécurité et la santé de votre enfant :

- Au préalable, conformez-vous à la fiche posologie de votre médicament et administrer la dose prescrite.
- Ne pas utiliser le lave vaisselle.
- Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas exposer directement au soleil ou à la chaleur.